




Hydragel Forbehandling

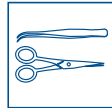

Forbehandlingsprodukt til kontaminerede instrumenter i sundhedssektoren, der ikke rengøres umiddelbart efter brug.

Anvendelsesområde	Sprayes på de kontaminerede instrumenter for at forhindre, at snavs ikke tørrer ind og at bakterier ikke begynder at gro. Til professionel brug.	
Produktegenskaber	Den gel-lignende spray danner en bakteriesikker hinde på instrumenternes overflade. Effekten holder i 5 dage. Hydragel er vandopløselig og nem at skylle af. Egnede til almindeligt anvendte materialer, dog ikke kobber og messing.	
Brugsanvisning	Sprayes direkte på instrumenterne i deres transportkasse. Det er vigtigt, at de er helt våde af den påførte gel. Følg sikkerhedsinstrukser for opbevaring og transport af instrumenterne. Vask instrumenterne som normalt.	
Bemærkning	Undgå kontakt med kemikalier, da det kan føre til korrosion og skade af metaller. Kemikalierne kan forblive aktive under den beskyttende hinde. Ved stænk på gulvet er det vigtigt at rengøre med vand, da gulvet kan blive meget glat.	
Indhold	Ingrediens	Effekt
	Alkanolaminsalte af fedtsyrer	5 - 15%
	Nonioniske overfladeaktive stoffer	< 5% Minder overfladespændingen og fjerner snavs.
	Konserveringsmidler	Konserveringsmiddel.
	Korrosionshæmmer	Forhindrer korrosion og dannelsen af mørke pletter.
	Antiskummemiddel	Reducerer produktets skummende egenskaber.
pH produkt	9,0	
Opbevaring	Opbevares ved stuetemperatur under +28°C. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.	
Produktionsland	FINLAND	
Anvendelses- og miljø sikkerhed	Produktet er bionedbrydeligt.	

**Forpackningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer**

6 x 750 ml

Varenummer

8222

GTIN

6417964082227

GTIN (salgsenhed)

6417964482959

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.plum.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.